

iQ-4VIEW 1.0.0 Quick Guide – Study Browser

Markiert alle Untersuchungen auf dieser Seite
Doppelklick auf "ANSICHTEN" ermöglicht eine schnelle Rückkehr auf die EasyWEB-Seite
Bietet zusätzliche Suchmöglichkeiten - nach Patient, Untersuchung, Serie, Bild oder Arbeitslistendaten
Hilfe Beinhaltet Nutzerhandbuch und Admin-Guide mit hilfreichen Informationen zu den Programmfunktionen
 Enthält Profileinstellungen zum Anpassen der angezeigten Informationen

Öffnet die Filteroptionen, um die angezeigten Untersuchungen anzupassen - Siehe unten
 Ein Klick auf das Auge öffnet iQ-4VIEW
 Startet den Suchprozess
 Ein Klick auf "+" eröffnet weitere Untersuchungsinformationen auf Serien- und Bildebene
 Auswahl der Untersuchung durch Markieren des Kästchens

Suche
 Nach Eingabe verschiedener Kriterien in die Felder unterhalb des Tabellenkopfes, kann nach Patienten oder Untersuchungen gesucht werden. Je mehr Kriterien verwendet werden, desto genauer fällt die Suche aus. Mit Platzhaltern wie "*" und "?" lässt sich die Suche auch weniger spezifisch gestalten.

Zusätzliche Ansichten für Untersuchungen - "EasyWEB" ist die gebräuchlichste

	PATIENTEN-ID	PATIENTENNAME	GESCHLECHT	GEBURTSDATUM	ALTER	INSTITUTION	UNTERS.
<input type="checkbox"/>	Demo197	Nephrohepatos Cystos	M	1940-01-01 [76]	58	IMAGE Information Systems Ltd.	396474
<input type="checkbox"/>	Demo004	Cerebellar, Atrophy	F	1994-06-14 [21]	8	IMAGE Information Systems Ltd.	1
<input type="checkbox"/>	Demo125	Heart, Child	M	1995-01-01 [21]		IMAGE Information Systems Ltd.	1

Filter Der "Filter anzeigen" Button ermöglicht dem Nutzer, die individuelle Anzeige mittels Filteroptionen anzupassen. Damit eine Untersuchung angezeigt wird, müssen alle Kriterien erfüllt sein.

Fügt der Untersuchung einen Link zu den Untersuchungsnotizen hinzu
 Öffnet den iQ-4VIEW Viewer im aktuellen oder einem neuen Fenster/Tab
 Bestimmt, ob Filterbereich geschlossen wird nach Klick auf "Filter anwenden"
 Aktualisiert die EasyWEB-Seite im gewünschten Intervall
 Löscht alle Filterkriterien

Anzahl der gleichzeitig angezeigten Untersuchungen
 Gelesene oder ungelesene Untersuchungen anzeigen
 Daten oder Zeiträume für anzuzeigende Untersuchungen eingeben
 Gewünschte Modalitäten auswählen

Bestimmte Ärzte auswählen
 "Empfangsdatum" bezieht sich auf den Tag, an dem die Untersuchung im PACS empfangen wurde, NICHT auf das Untersuchungsdatum
 Nach abgeschlossener Filterauswahl, Klick auf "Filter anwenden"

Filter verstecken | Alles markieren | Als gelesen markieren | Als ungelesen markieren | Anzeigen | Weiterleiten | Löschen | Export | DICOM herunterladen | Inhalt herunterladen | Speicherort ändern

Konfiguration:
 Einträge pro Seite: 20
 Den Link zu den/der Untersuchungsnotiz(en) zeigen: Nein Ja
 Betrachter öffnen in: Aktuelles Fenster Neues Fenster
 Filter immer anzeigen: Nein Ja
 Intervall der automatischen Aktualisierung: 0 Sekunden (min. 30)
 Filter löschen

Nach Status filtern:
 Gelesene Untersuchung(en)
 Ungelesene Untersuchung(en)
 Alle

Nach Untersuchungsdatum filtern:
 Heute
 Gestern
 Vorgestern
 Letzte 7 Tage
 Letzte 14 Tage
 Letzte 30 Tage
 Letzte 90 Tage
 Alle
 Von:
 An:

Nach Modalität filtern:
 CR CT DX MG
 MR NM OT PT
 SR RF US XA
 DOC

Nach anderen filtern:
 Befundender Arzt:
 Anfragender Arzt:
 Überweisender Arzt:
 Empfangsdatum
 Von: 00:00:00
 Bis: 23:59:59
 Quell-AE:

Filter anwenden

iQ-4VIEW 1.0.0 Quick Guide – Diagnostischer Viewer

Schließt den Viewer und öffnet die zuletzt verwendete Navigation

Vergrößert das Browser-Fenster. Drücken Sie [ESC], um den Vollbildmodus zu beenden.

Bietet Informationen über Softwareversion und Kontaktdaten

Öffnet die Nutzerdokumentation als PDF in einem neuen Tab

Sprache der Nutzeroberfläche kann über ein Drop-Down-Menü ausgewählt werden

Öffnet das Menü für die Viewereinstellungen

Schalter zeigt/versteckt die Serienvorschauleiste

Schalter dient zum Anheften/Losheften der Serienvorschauleiste

Öffnet eine zweite Serienvorschauleiste für die zweite geladene Untersuchung

Mit Doppelklick auf eine Serie kann man diese in einem einzelnen View betrachten. Ein weiterer Doppelklick bringt die Bildschirm-Teilung zurück.

Ziehen Sie die Serienvorschaubilder zur Betrachtung in die untenstehenden Views

Orange farbiger Rahmen zeigt die aktive Serie an

Tabs zeigen die Beschreibungen der geladenen Untersuchungen

Untere Tool-Leiste

Rechtsklick auf einen Button (oder Antippen und Halten auf Touchscreens) ermöglicht den Zugriff auf die Optionen.

Cine-Modus

Center/Window - Linksklick in einen View und Mausbewegung nach oben/unten bzw. links/rechts für Anpassungen der Helligkeit bzw. des Kontrastes

Messwerkzeuge

Farbschemata

Vergrößern/Bewegen - Mauszeiger am Bildrand aktiviert die Zoom-Funktion, in der Bildmitte die Bewegenfunktion

Vergrößerungsglas

Spiegeln/Rotieren

Bildschirm-Teilung auf Serien-ebene

Strukturiertes Report Editor

Aktiviert Scoutlinien

Schalter zeigt/versteckt die Serienvorschauleiste

Schalter dient zum Anheften/Losheften der Serienvorschauleiste

Zurücksetzen des Bildes

Aktiviert Synchronisation

Schaltet Text-Overlay an und aus